

## WARTUNGS- UND PFLEGearBEITEN DURCH DEN ANWENDER

Es müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

## TECHNISCHE DATEN

- Obere Schaumschicht mit Würfelstruktur in 5-Zonen Einteilung
- Längsseitige Randzonenverstärkung von 10 cm aus festem Kaltschaum
- Kopfbereich fester Kaltschaum (35 cm breit)
- 8 miteinander verbundene Zellen (Foam in Cell)

Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse I (gemäß der Richtlinie 93/42/EWG)

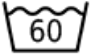

Klimatische Bedingungen: Umgebungstemperatur von 10° C bis 40° C  
Luftfeuchtigkeit von 20% bis 75%

Gewährleistung: 24 Monate

Abmessungen (B/L/H): 90 x 200 x 18 cm  
Gewicht: ca. 14 kg

Zulässiges Patientengewicht: von 20 kg bis 195 kg

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Waschtemperatur 60° C
	Nicht bleichen
	Nicht bügeln
	Bei max. 60° C trocknen
	Nicht chemisch reinigen
	Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte genannt sind.

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.



Geschäftsführer: Oliver Otte, Martin Herberg



## GEBRAUCHSANWEISUNG

### WICHTIGE INFORMATION

Die gelieferte SLK GreenCare wurde für den Versand komprimiert. Nach dem Auspacken benötigen die Zellen eine gewisse Zeit, um sich wieder in die ursprüngliche Form auszudehnen. Das System kann danach eingesetzt werden. **Bitte beachten Sie die Aufbauanleitung vor dem ersten Einsatz des Systems.**

SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Am Herdicksbach 18 · D-45731 Waltrop

Telefon : +49(0)231 – 925360 – 0

Telefax: +49(0)231 – 925360 – 29

Email: info@slk-gmbh.de

Internet: www.slk-gmbh.de

## INDIKATIONEN

---

Die SLK GreenCare findet aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Wirkungsweise Anwendung in der Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium IV nach EPUAP. Durch die Auflagedruckreduktion können liegebedingte Schmerzen reduziert werden. Der hochwertige, profilierte Kaltschaum zusammen mit den einzeln entnehmbaren Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum unterstützt die Wirbelsäule und sorgt für optimalen Liegekomfort. Der atmungsaktive Bezug ist wasserundurchlässig und waschbar. Das System ist für ein Körpergewicht von 20 kg bis 195 kg geeignet.

## WIRKUNGSWEISE

---

Durch die Kombination eines hochwertigen Kaltschaumrahmens mit (Foam-in-Cell) wird eine optimale Druckentlastung am Körper in der jeweiligen Liegeposition erreicht. Dies wird unterstützt durch die spezielle Kombination der (Foam-in-Cell) mit ihren vertikalen Lüftungsbohrungen im Schaumstoff und der automatischen Ventil-Regelung. Das Druckventil befindet sich im Kopfbereich und ist auf eine mittlere Einsinktiefe festgelegt.

- > Schwere Patienten sinken tiefer ein
- > Leichtere Patienten sinken weniger tief ein

Durch schmale Luftanschlussschläuche wird ein langsamer Ausgleich zwischen den Zellen gewährleistet (schonender für den Patienten). Durch die Luft innerhalb des Schaums wird die verdrängte Luft innerhalb der Zellen ausgeglichen.

Durch das Gewicht des Patienten wird das Volumen der Zellen verkleinert bis der Gegendruck des Schaums und der Luftdruck im System die Gewichtskraft ausgleicht.

Dies hat zur Folge, dass die Matratze an allen gefährdeten Körperzonen eine Reduzierung des Auflagedruckes sicherstellt.

## WICHTIGE HINWEISE ZUM EINSATZ

---

Die SLK GreenCare eignet sich zur Nutzung auf Pflegebetten und Standardbetten. Einstellungen am Bett können vorgenommen werden, ohne die Funktionstüchtigkeit des Systems zu beeinträchtigen. Vor dem Einsatz muss unbedingt die mitgelieferte Aufbauanleitung befolgt werden.

Bei Verwendung des originalen SLK Inkontinenzbezuges ist die Seite, auf welcher der Patient liegt, durch die Beschriftung "GreenCare" gekennzeichnet. Bei der Verwendung von Seitengittern an verstellbaren Betten für behinderte Menschen muss auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Oberkante des Lagerungssystems und dem oberen Ende des Bettgitters geachtet werden (220 mm nach DIN 1970:2000). **Im Bedarfsfall sollten entsprechende Seitengittererhöhungen zum Schutz des Patienten angebracht werden.**

## ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

---

### Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei einer bestehenden Schaumstoffallergie eingesetzt werden.

## Inkontinenz

Die Matratze wird standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgeliefert. Aus hygienischen Gründen sollte das System nur mit diesem Bezug verwendet werden. Der Bezug kann jederzeit abgenommen und gewaschen werden (bei 60°). Siehe hierzu auch die folgenden Reinigungshinweise, sowie die am Bezug angebrachten Waschanleitungen.

## REINIGUNG

---

Da das Reinigen von kompletten Matratzen im Allgemeinen schwierig ist, wird die Matratze standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug, mit verdecktem Reißverschluss, ausgeliefert. Ein Verschmutzen des Kerns kann somit verhindert werden. Der Inkontinenzschutzbezug ist bei 60° waschbar, und mit üblichen Desinfektionsmitteln behandelbar.

Bitte beachten Sie den beigefügten Pflege und Reinigungshinweis für SLK Systeme.

Es ist darauf zu achten, dass das System von außen gut kenntlich gemacht und ein entsprechendes Anschreiben (gut sichtbar) beigefügt wird. Ein Hygieneplan (Merkblatt) über die Reinigung der SLK-Produkte kann in unserer Servicestation in Waltrop angefordert werden. Die Reinigung und Wiederaufbereitung kann jederzeit im SLK-Hygiene-Center Waltrop durchgeführt werden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unsere Servicestation in Dortmund.