



senectovia®

ViscoCare[®]
Comfort


viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Randzonenverstärkung



Noppenstruktur wirkt
Wärmestau entgegen

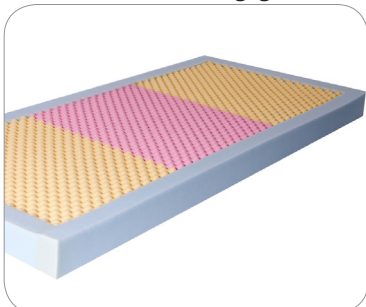

Druckentlastung durch 3
verschiedene Härtezonen

SLK[®]



- profiliertes, viskoelastisches Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Randzonenverstärkung
- in zwei verschiedenen Höhen erhältlich:
- ViscoCare Comfort 120 Höhe: 12 cm
- ViscoCare Comfort 150 Höhe: 15 cm
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

ViscoCare Comfort

ViscoCare Comfort 120
max. Patientengewicht: 130 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10018 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10019 (100 x 200 cm)

ViscoCare Comfort 150
max. Patientengewicht: 200 kg
Dekubitusstadium: I bis III
Artikel-Nr.: 10020 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10021 (100 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 15 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff
- Raumgewicht: 50 / 40 kg / m³

Lieferumfang

- ViscoCare Comfort® 120 / 150
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

TECHNISCHE DATEN

ViscoCareComfort

Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse I (gemäß der Richtlinie 93/42/EWG)

Klimatische Bedingungen: Umgebungstemperatur von 10° bis 40° C
Luftfeuchtigkeit von 20% bis 75%

Gewährleistung: 24 Monate

Matratze

Abmessungen (B/L/H): 90 x 200 x 15 cm

100 x 200 x 15 cm

Sondermaße auf Anfrage

ca. 9 kg (90 x 200 x 15 cm)

ca. 10 kg (100 x 200 x 15 cm)

Zulässiges

Patientengewicht: von 30 bis 200 kg

Material: Viskoelastischer Schaumstoff

Polyether-Schaumstoff

Zertifikate: Oekotex Standard 100

Bezug

Abmessungen: für 90/100 x 200 x 15 cm

Material: Polyurethan (PU) Bi-Stretch

175 gr/qm

Zertifikate: Oekotex Standard 100 –

schwer entflammbar nach CRIB

5 Norm

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

| | |
|--|--|
| | Waschtemperatur 90° |
| | Nicht bleichen |
| | Nicht bügeln |
| | Bei max. 60° trocknen |
| | Nicht chemisch reinigen |
| | Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte genannt sind. |

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.



medical solutions

Geschäftsführer: Oliver Otte, Martin Herberg



senectovia medizintechnik ag

In der Luberzen 1 · CH-8902 Urdorf · Tel. 044 735 35 45 · Fax 044 735 35 40
info@senectovia.ch · www.senectovia.ch

senectovia®

ViscoCare
SLK ViscoCare Comfort I 50®

Version 2.4 - SLK 03/2020

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE INFORMATION

Die gelieferte Schaumstoffmatratze wurde für den Versand komprimiert. Nach dem Auspacken benötigt die Matratze eine gewisse Zeit, um sich wieder in die ursprüngliche Form auszudehnen. Daher sollte die Matratze vor der Benutzung einige Stunden ohne Belastung in waagerechter Position liegen. Die Matratze kann dann wieder wie gewohnt eingesetzt werden.

Maße in cm (B / L / H):

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|----|
| | 90 | x | 200 | x | 15 |
| | 100 | x | 200 | x | 15 |
| | | x | | x | |

SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Am Herdicksbach 18 · 45731 Waltrop

GERMANY

Telefon: +49(0)231 – 925360 – 0

Telefax: +49(0)231 – 925360 – 29

Email: info@slk-gmbh.de

Internet: www.slk-gmbh.de

Hilfsmittelnummer: 11.29.05.1033





INDIKATIONEN

Die ViscoCareComfort 150 findet aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Wirkungsweise Anwendung in der Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium III nach EPUAP. Durch die Auflagedruckreduktion können liegebedingte Schmerzen reduziert werden. Der hautfreundliche, atmungsaktive Bi-Stretch-Bezug ist wasserundurchlässig und waschbar. Das System ist für ein Körpergewicht bis 200 kg geeignet.

WIRKUNGSWEISE

Die viscoelastische Oberfläche der Matratze sorgt für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition. Erreicht wird dies durch die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Materials. Viscoelastische Schaumstoffe reagieren auf das aufliegende Gewicht und auf die Umgebungstemperatur. Durch die Körperwärme wird der Schaumstoff weicher und anschmiegsamer, ohne seine Elastizität zu verlieren. Dies hat zur Folge, dass die Matratze an den Auflagepunkten weicher ist als an den umliegenden Stellen. Dadurch passt sich die Matratze im Bereich der Kontaktfläche optimal an. So kann das Körpergewicht auf eine größtmögliche Fläche verteilt werden, wodurch der Auflagedruck minimiert wird. Ein Durchliegen der Matratze wird durch eine Stützschicht aus PUR-Schaumstoff auf der Unterseite verhindert. Zusätzlich besitzt die Matratze eine Klimaprofilierung in einer 3-Zonen-Anordnung um einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken.

WICHTIGE HINWEISE ZUM EINSATZ

Das System ViscoCareComfort eignet sich zur Nutzung auf Pflegebetten und Standardbetten. Einstellungen am Bett können vorgenommen werden, ohne die Funktionstüchtigkeit des Systems zu beeinträchtigen. Beim Einlegen ins Bett muss darauf geachtet werden, dass die Matratze mit der viscoelastischen Seite nach oben ins Bett gelegt wird. Bei Verwendung des originalen SLK Inkontinenzbezuges ist die Seite, auf welcher der Patient liegt, durch die Beschriftung "Visco Care Comfort" gekennzeichnet. Bei der Verwendung von Seitengittern an verstellbaren Betten für behinderte Menschen muss auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Oberkante des Lagerungssystems und dem oberen Ende des Bettgitters geachtet werden (220 mm nach DIN 1970:2000). **Im Bedarfsfall sollten entsprechende Seitengittererhöhungen zum Schutz des Patienten angebracht werden.**

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei einer bestehenden Schaumstoffallergie eingesetzt werden.

Inkontinenz

Da Schaumstoff ein extrem saugfähiges und Flüssigkeiten speicherndes Material ist, sollte bei vorliegender Inkontinenz immer ein flüssigkeitsundurchlässiger, jedoch gleichzeitig atmungsaktiver Bezug eingesetzt werden. Die Matratze wird standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgeliefert. Dieser Bezug ist nicht nur wasserdicht und

atmungsaktiv, sondern zusätzlich auch noch antimikrobiell ausgestattet. Der Bezug kann jederzeit abgenommen und gewaschen werden (bei 60°C – 90°C). Siehe hierzu auch die aufgeführten Reinigungshinweise und die am Bezug angebrachten Waschanleitungen.

REINIGUNG

Da sich das Reinigen von kompletten Matratzen im Allgemeinen sehr schwierig gestaltet, wird die Matratze standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug und/oder verdecktem Reißverschluss ausgeliefert. Ein Verschmutzen des Kerns kann somit verhindert werden. Der Inkontinenzschutzbezug ist bei 60-90°C waschbar, und mit üblichen Desinfektionsmitteln behandelbar. Es ist darauf zu achten, dass das System von außen gut kenntlich gemacht und ein entsprechendes Anschreiben (gut sichtbar) beigefügt wird. Ein Hygieneplan (Merkblatt) über die Reinigung der SLK - Produkte kann in unserer Servicestation in Dortmund angefordert werden. Detaillierte Informationen zur Reinigung und Wiederaufbereitung des SLK-Systems erhalten Sie im SLK-Hygiene Center. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unsere Servicestation in Waltrop.

WARTUNGS- UND PFLEGEARBEITEN DURCH DEN ANWENDER

Es müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.