

Data-driven
patient care by
compliant concept AG



Automatisierte Umpositionierung, mehr Zeit für Patienten & Pflege.

Das **Active Mobilisation System™** entlastet Ihre Pflege bei der körperlich aufwendigen Routinearbeit des Umpositionierens und trägt erheblich zur Qualitätssteigerung für Patienten und Pflege bei. Besonders bei anspruchsvollen Patienten, welche manuelle Lageänderungen durch Pflegenden ablehnen, ist unser Active Mobilisation System eine hilfreiche Unterstützung.

Wirksame
Dekubitus-
prophylaxe und
Therapie



Datenbasierte automatische Umpositionierung.

Das Active Mobilisation System (AMS) ist eine Matratze zur automatisierten, schmerzfreien Umpositionierung von Patienten, insbesondere wenn sie manuelle Lageänderungen durch Pflegenden ablehnen, z.B. bei Schmerzen, Demenz, Delir, Unruhe oder Aggressivität.

Besonders nachts muss ein grosser Teil der Pflegezeit in die Umpositionierung von Dekubitus gefährdeten Personen investiert werden. Viele Patienten lehnen die erforderliche Mobilisierung alle zwei bis drei Stunden jedoch ab.

Patientensicherheit

Die sanften und automatischen Umpositionierungen garantieren eine wirksame Unterstützung Ihrer Dekubitusprophylaxe und Therapie bis Grad 4. Schmerzhaft und pflegeintensive Komplikationen werden dadurch vermieden.^{1,2}

Mehr Pflegezeit, weniger Verletzungen

Die Pflegekräfte werden durch AMS von körperlich schweren Routinearbeiten entlastet und gewinnen Zeit für bedeutende Pflegeaufgaben und das Wohlbefinden der Patienten.

Schlaf- und Lebensqualität

Die reduzierten manuellen Umpositionierungen, der hohe Matratzenkomfort und die nahezu erreichte Geräuschlosigkeit erlauben es, die Schlaf- und Lebensqualität bei bis zu 72,7%³ Ihrer Patienten mit einem AMS in Anwendung nachhaltig zu verbessern.

Wie funktioniert die AMS Matratze?

Das Active Mobilisation System basiert auf einer Matratze mit normalen Liegeeigenschaften. Darunter befinden sich patentierte, aktive Hightech-Module, welche Ihre Patienten kontinuierlich und kaum wahrnehmbar von einer leichten Seitenlage (Drehung bis zu 20°) in die andere umbetten. Durch das einzigartige Wirkungsprinzip von der Kombination aus einer lokalen Druckentlastung und der zusätzlichen Drehung ist AMS schonend für den Patienten, verbessert dessen Schlafqualität und dadurch sein Allgemeinbefinden erheblich. Aufgrund der reaktiven Schaumstoffmatratze bleibt die Körperwahrnehmung und Eigenmobilität Ihrer Patienten erhalten. Besonders demente Patienten spüren dadurch ihren Körper und fühlen sich wohl.

¹ S. Krause, Anwendungsbeobachtung Kantonsspital Winterthur (2018)
² Dr. Feuchtinger, Universitätsklinikum Freiburg, Sanfte Druckentlastung, Die Schwester der Pflege (2018)
³ Robert Koch-Institut (2003). Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 12: Dekubitus, Berlin: Robert Koch-Institut, S.10
⁴ Bombois, Durambure, Pasquier F. & Monaca C., 2010, Swiss Federal Statistical Office
⁵ ANQ Sturz und Dekubitus Bericht 2017

Haben wir Ihr Interesse für unsere technologiebasierten Pflegelösungen geweckt?

Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten und erfahren Sie, bei einer kostenlosen Bedarfsermittlung oder einem unverbindlichen Test, mehr über unser Angebot.

compliant concept AG
Udermülistrasse 28
8320 Fehraltorf, Schweiz

Tel: +41 44 552 15 00
info@compliant-concept.ch
compliant-concept.ch

Bis zu **47%**
der Pflegeheimbewohner müssen umpositioniert werden.³

Bis zu **39%**
der Patienten leiden an einer Demenz oder an Schlafstörungen und lehnen deshalb manuelle Umpositionierungen ab.⁴

4.3%
aller Spitalpatienten in der Schweiz erleiden einen Dekubitus.⁵

